



瑞愛生医

ペット用 猫砂分析器

血尿



猫は水を飲むことを好まないため、10歳以上の高齢猫は3匹に1匹が慢性腎臓病です。初期症状が分かりにくく、通常飼い主が気がつくことは困難で、特別な状況が発見された時にはすでに後期に入っています。早期発見、早期治療で病気の経過を延長し、猫の生活品質を保つことができます。



01

慢性腎不全

家猫の死因トップ

02

慢性膀胱炎

03

尿道結石

04

尿路感染症

よくある採尿方法

直接採取

1. 採取が難しい
2. 環境に汚染される可能性がある

膀胱圧迫

1. 尿が溜まるまで4~5時間かかる
2. 手で膀胱を圧迫するので、破裂する危険性がある
3. 尿液が生殖器系の細胞を汚染する



膀胱注射

侵襲性検査のリスクがある



ペット用 猫砂分析器-特色

PetEye



家庭で使用


いつでも測定

簡単操作

早期発見

ペット用 猫砂分析器-使用方式

1.

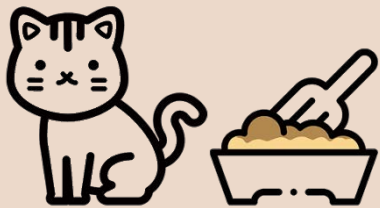

猫の尿を吸収した猫砂を採取、
またはトイレシートを切り取る

2.



容器に猫砂またはトイレシートと100～200ccの水を入れる
水の深さは1～2cm




3.



容器を軽く揺らした後、
5分間放置し、その後は
揺らさないようにする

4.

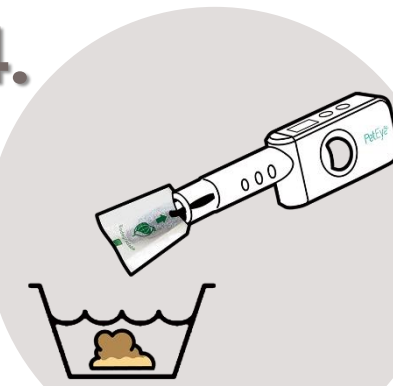

PetEyeにフィルターを取り付けて測定する

ペット用 猫砂分析器-説明



充電除菌
ホルダー



センサーボタン電気量/ファン/
紫外線除菌ランプ

光学センサー

フィルタークリップ



センサーボタン

電源ボタン

測定器

ディスプレイ





使用前によくある質問

質問1 どのような猫砂に使えますか？

☒ おから ☒ トウモロコシ ☒ 鉱物

☒ シリカゲル ☒ ゼオライト



質問2 猫トイレは一層式と二層式のどちらでも使用できますか？

どちらでもご使用いただけます。フィルターを合わせて使用する必要があります。使用方法は以下の動画をご参照ください: <https://youtu.be/eHfGB5xBd0Q>



PetEye[®]

使用時の注意事項



<https://youtu.be/eHfGB5xBd0Q>

台湾での実績



關於恆睿 ▾

喵仔棒

全家寶

購物須知 ▾

貓仔Blog ▾



喵仔棒(套裝)

- 全台首創居家貓咪檢測照護商品【喵仔棒】 🐱
- 可以在家輕鬆檢測 ❤️ 【貓咪尿液潛血反應】
- 每天只要【5秒鐘】
- 只要採集尿漬貓砂塊，【非侵入式】
- 達到早期發現判斷，早期進階送診的目的地
- 獨家獨特光電檢測技術
- 方便攜帶、輕巧好用

全店，防疫齊心~全館免運費！！

— 1 +

加入購物車


ビジネスモデル (動物病院 / ペットホテル)

- **ワンストップサービス**

動物病院やペットホテルで医療や美容サービスなどと合わせて、PetEyeを使用した定期測定を追加購入サービスとして提供する。

- **飼い主の粘着性向上**

サービス提供時にペットの健康に関する基礎的な知識を飼い主に知ってもらう。動物病院やペットホテルは常客が多いため、飼い主のPetEye使用後の粘着性を高めることができる。

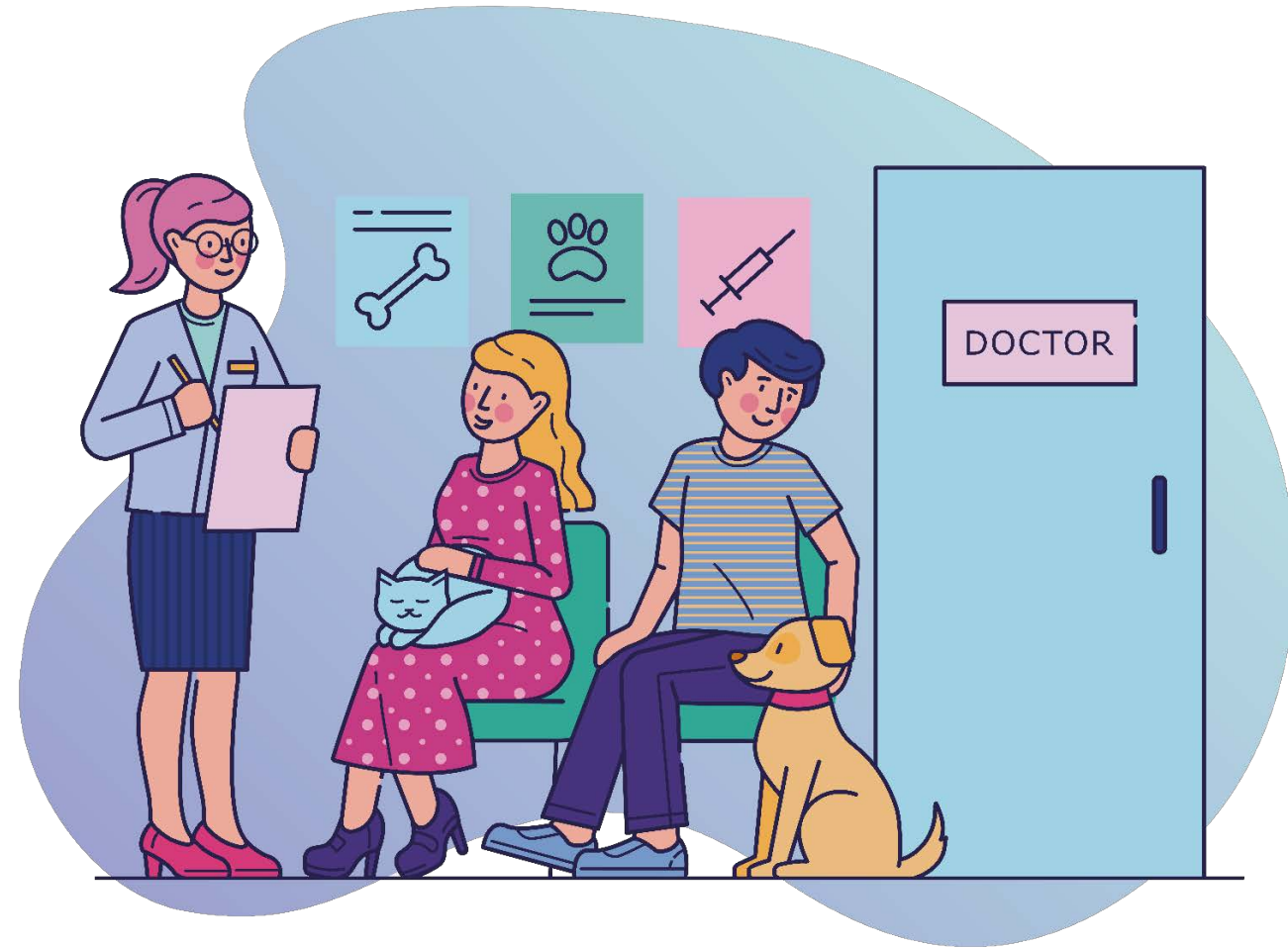

ビジネスモデル(ペット保険)

- **契約者へのサービスとして**
契約者の測定頻度が高まると、保険金の支払い額が減少する。
- **保険料が一定額に達した契約者は優待価格で購入できる**

